

主机快速操作指南

一、主机



1.首先打开机器上部盖子。



2.给净水桶内装上水即可。



3.将污水桶放置机器内。



4.在安装污水桶时，向下按下灰色卡扣，听到“咔嗒”声向内推动连接头，卡紧。



5.盖上主机盖。



6.将软管与主机连接。




7.连接电源插座。



8.打开电源开关。

二、污水桶清洁

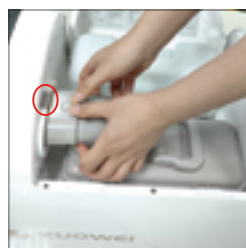

1.向下按下灰色卡扣，听到“咔嗒”声后，向外推动连接头，将污水桶取出。



2.将污水桶盖拧开。



3.将污物倒入便器或便桶，用少许的水冲洗干净即可。

三、主机排水流程



1.首先打开主机盖，取出清水桶，将清水桶内的水倒完。



2.将底托水侧倒到储水桶提出底托。



3.打开排水阀排水，等待排完储水桶内水。



4.插上主机电源，打开主机电源，稍等后机器自动排除内部管道内部余水。



5.最后用毛巾擦干储水桶内壁及用毛巾吸出桶底小圆槽内残余水。



6.排水完成关闭排水阀，成90度垂直即可。

四、操作面板

1.自动模式



选择自动模式后，大便、小便、清洗、干燥会全部进入不可选择状态，系统会自动执行大小便处理。

2.手动模式



选择手动模式后，大便、小便、清洗、干燥会进入可选择状态。

	电源开关键 开始或停止自动模式的操作键		小排便处理键 按下该键，进入小便清理流程
	大排便处理键 按下该键，进入大便清理流程		自动清洁处理键 按下该键可对工作头内表面进行冲洗(此项功能为选配项)
	私处清洗处理键 按下该键将对人的私处进行温水清洗		干燥排便处理键 按下该键，进入干燥流程

操作注意事项

适用人群

- ①无导尿管、无尿量监测使用记录
- ②皮肤无褥疮、严重皮炎或破损者；
- ③体重大于或等于35公斤；
- ④大腿无严重变形；
- ⑤大便干硬者大便直径需小于33毫米
- ⑥无严重痔疮；
- ⑦精神无狂躁行为（如撕被子、手抓大便、拉扯尿不湿）；
- ⑧需平躺卧床，大小便排便时侧卧最好不要大于30度。